
Tableau Wax

타블로 왁스


Bone Hemostasis Material



우수한 지혈효과 / 생체 적합성 우수 / 사용편의성

제품소개

Tableau Wax의 원재료는 폴록사머(PEO-PPO 공중합체)로 외과적 수술 시 뼈 내부에 존재하는 혈관 출혈을 지혈하기 위해 사용하는 흡수성 뼈 지혈제 제품입니다.

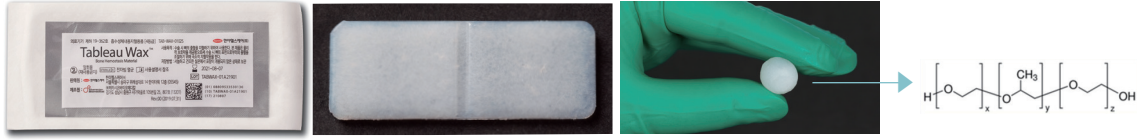

지혈작용

Tableau Wax는 수용성 합성 물질로서 뼈 단면에 접촉되어 뼈 표면의 밀폐성을 유지시킵니다. 이를 통해 뼈 표면에 물리적 보호막을 형성하여 국소적 지혈작용을 하게 됩니다.

특장점

1. 지혈효과

Tableau Wax는 뼈 표면에 접촉되어 국소적 지혈효과를 확인할 수 있습니다.

2. 안전성

폴록사머는 의약산업분야에서 임상적으로 널리 사용되고 있는 안전성이 확보된 생흡수성 고분자입니다.

3. 사용편의성

껌과 같은 제형으로 뼈 단면에 얇게 퍼서 적용하기 쉽습니다.

적용범위

흉골절개술, 골반골절수술, 비구골절수술, 장관골의 관혈적 정복술, 척추수술, 인공관절 삽입술 등

사용방법

1. Tableau Wax를 개봉하여, 전량 또는 필요한 양만큼 떼어냅니다.
2. 마른 수술용 장갑을 착용한 채, 10~15초 동안 조작하여 부드럽게 만듭니다.
3. 뼈 출혈 부위에 손 또는 기구로 Tableau Wax를 위치시켜 퍼 바릅니다.

급여인정기준

1. 수용성합성물질로 만들어진 뼈 지혈제는 BONE WAX에 비해 뼈 생성 및 골 융합 용이성, 뼈 감염을 방지하는 점 등을 감안하여 별도 산정하되, 만65세 이상의 흉골절개를 시행하는 심장수술에 한하여 사용량을 5g까지 인정함.
2. 상기 1항의 급여대상 이외 다음의 경우에 사용하는 치료재료비용은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.

- 다 음 -

- 가. 상기 1항의 만65세 이상의 흉골절개를 시행하는 심장수술에서 인정용량을 초과하여 사용한 경우
 나. 만65세 미만의 흉골 절개를 시행하는 심장수술
 다. 출혈이 많은 수술인 골반골절수술
 라. 비구골절수술
 마. 장관골의 관혈적정복술
 바. 척추수술
 사. 인공관절 삽입술

(고시 제 2017-152호, 2017. 9. 1. 시행)

제품정보



상품명	Tableau Wax · 타블로 왁스	EDI코드	M2070216
품목명	흡수성 뼈 지혈제	가격	94,280원
원재료	폴록사머 PEO-PPO copolymer	판매단위	5EA/Box
		저장방법	실온보관(1~30℃)
규격	2.5g	사용기한	24개월